



greiner bio-one

Référence Greiner: BRVGP2

Fiche Technique 902-3

Band de rechange pour garrot Praemeta 902

Date de création :
Créé par

1.01.2010
Peter Friesen

Identification du produit

Désignation : Bande de rechange pour garrot Prameta Vert modèle 902 avec 1 poussoir

Application : Accessoire pour prélèvement sanguin

Référence fournisseur : 902-3

Informations sur la fabrication

- Pays de fabrication : **Allemagne**
- Nom du fabricant : **Prämeta**
- Code fournisseur : **161806**
- Certification : **ISO 9001 : 2000**

Conditionnement

- Conditionnement : Boîte de 1 pièce
- Sous-conditionnement : sans
- Minimum de vente : Boîte de 1 pièce

Traçabilité

N° de lot

-Constitution. ex : 0905A
09 : année de production (2009)
05 : semaine de production
A : traçabilité interne

- Localisation : Carton+ boîte

Date limite d'utilisation

-Garantie : 2 ans

Qualité bactériologique

- Non stérile

Assurance qualité

- Normes et directives :
- Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Spécifications

- Matière : tissu mélange de fils de coton, polyamide et polyuréthane
- Dimensions : Longueur de la bande : 570 ± 10 mm
Largeur de la bande : 23 mm
- Informations complémentaires :
 - o Radioactif : non
 - o Usage unique : non
 - o Latex : sans

Mode d'emploi

1. Presser le cran de sécurité et extraire la bande
2. Glisser la nouvelle bande sous le ressort de la boucle, puis dans la pièce du bout
3. Contrôler sa bonne fixation.

Recommandations d'usage et limites d'utilisation

Désinfection :

Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldehydes)

Concentration habituelle de la dissolution : 0,5%

Rinçage

Séchage

Fréquence : selon les besoins