



# Plaque eutectique +4°C Hemobox®

La plaque eutectique restitue de manière homogène une température définie sur une longue durée. Elle assure la conservation et l'intégrité durables des prélèvements.



## CARACTÉRISTIQUES

Température :

- Conçue pour la mallette Hemobox® : circulation optimale du froid du haut vers le bas pour un meilleur maintien en température.

Étanchéité :

- Enveloppes des plaques étanches, bouchons soudés par ultrasons, plaques rigides.

Qualité :

- Liquide eutectique haute performance.

## MODE OPÉRATOIRE

**Stockage :** congelez la plaque eutectique en la plaçant à l'horizontal dans votre congélateur pendant 24h minimum. Durant la congélation, évitez d'empiler les plaques eutectiques ou laissez un espace entre chacune d'elles.

**Utilisation :** sortez la plaque eutectique du congélateur et placez la dans votre conteneur isotherme.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| Froid restitué | T°C de congélation conseillée | Temps de congélation |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| +4°C à +8°C    | -18°C                         | 24h                  |

## PRÉCAUTIONS

- Ne pas mettre en contact direct avec le produit à conserver.
- Ne pas exposer la plaque eutectique à des températures élevées, flammes ou sources de chaleur intenses.
- Ne pas laver la plaque eutectique au lave-vaisselle, nettoyez-la à l'eau savonneuse.
- Manipulez la plaque eutectique avec précaution car une fois congelée, elle devient sensible au choc.



**Dim. plaque rigide modèle M en mm :**

**réf. STI809 :** L 175 x l 105 x H 30

**Dim. plaque rigide modèle L en mm :**

**STI811 :** L 320 x l 175 x H 30

**Dim. plaque rigide modèle XL en mm :**

**STI813 :** L 325 x l 265 x H 30

**Matériaux :** coque extérieur PEHD

*Livrée seule*

### Contacts

www.hemobox.com  
contact@hemobox.com  
Tél. 04 76 38 64 00  
Fax 04 76 38 54 39