

Bezpečnostní lancety MiniCollect®

Návod k použití

Použití

Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** jsou určeny pro použití při každodenních rutinních odběrech kapilární krve, prováděných kvalifikovaným praktikem. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití a musí být používány příslušně školeným zdravotnickým personálem podle těchto pokynů.

Popis výrobku

Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** jsou sterilní, jednorázové prostředky aktivované tlačítkem, určené k provedení vpichu do kůže a umožňující kontrolovat délku a hloubku vpichu. Tento prostředek je tvořen jehlou/čepelí z nerezové oceli v plastovém pouzdře a po vpichu dojde k automatickému a trvalému zasunutí.

Bezpečnostní opatření/varování

- Naše pokyny jsou pouhým doporučením. Manipulace s bezpečnostními lancetami **MiniCollect®** musí být prováděna v souladu s předpisy a postupy platnými ve vašem zdravotnickém zařízení.
- Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu s biologickými vzorky zajistěte dostatečnou lékařskou pomoc.
- Všechny bezpečnostní lancety **MiniCollect®** likvidujte odhozením do nádob schválených pro likvidaci biologického odpadu.
- Při propichování kůže a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice na jedno použití, aby bylo riziko expozice co nejmenší.
- Nepoužívejte bezpečnostní lancety **MiniCollect®** po datu jejich expirace.
- Nepoužívejte bezpečnostní lancety **MiniCollect®**, pokud byl odstraněn ochranný kryt.
- Lancety s hloubkou vpichu větší než 2 mm se nedoporučuje používat u dětí do jednoho roku věku.

Skladování

Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F). Uchovávejte na suchém místě mimo působení zdrojů přímého či nadměrného tepla.
POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

Zacházení


PŘED PROVEDENÍM VPICHU DO KŮŽE SI PROSTUDUJTE VŠECHNY INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU

Vybavení potřebné k odběru krve.





Dbejte na to, abyste před provedením vpichu měli připraveny tyto materiály:

- Všechny potřebné zkumavky **MiniCollect®**, seřazené podle velikosti, způsobu plnění a přídavné látky, nebo další nezbytné odběrné nádoby. **POZNÁMKA:** Koagulační zkumavky 9NC **MiniCollect®** se používají pouze k odběru žilní krve.
- Rukavice a osobní ochranné pomůcky na jedno použití.
- Štítky pro pozitivní identifikaci vzorků pacientů.
- Tampony napuštěné alkoholem pro očištění místa vpichu.
- Náplast nebo gáza.
- Nádoba na ostré předměty pro bezpečnou likvidaci použitého materiálu.

Verzi bezpečnostní lancety **MiniCollect®** je třeba zvolit podle tloušťky tkáně pacienta a požadovaného množství odebírané krve.





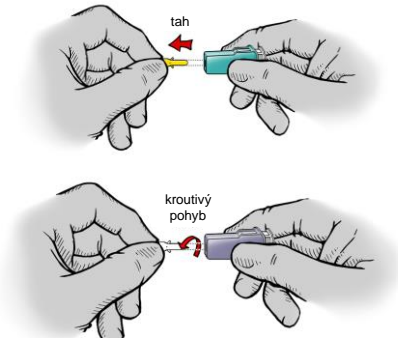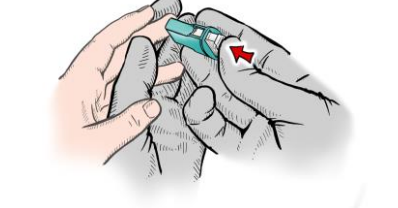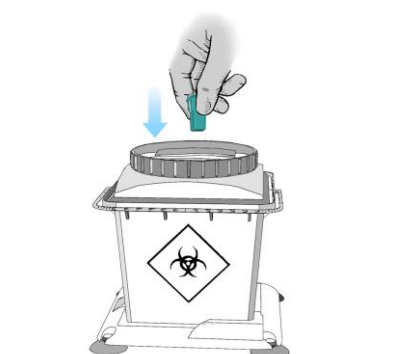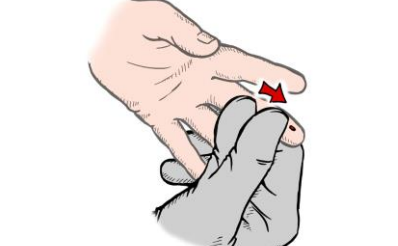

Bezpečnostní lancety MiniCollect®		
Barva	Průměr/délka jehly nebo čepel	Dosažitelné množství krve
Levandulová (jehla)	28G / 1,25 mm	
Oranžová (jehla)	23G / 2,25 mm	
Růžová (čepel)	1,00 mm / 1,00 mm	
Zelená (čepel)	1,50 mm / 1,50 mm	
Modrá (čepel)	1,50 mm / 2,00 mm	

Na místo odběru lze na 3 až 5 minut přiložit zahřátý vlhký ručník (nebo jiné zahřívací pomůcky) s teplotou nepřevyšující 42 °C (108 °F).

1	<p>Místo vpichu ošetřete vhodnou dezinfekcí. Po očištění nechte místo vpichu do kůže oschnout na vzduchu, aby se mohl uplatnit aseptický účinek alkoholu. Rezidua alkoholu mohou způsobit rychlou hemolýzu, mohou mít nepříznivé účinky na výsledky testu a mohou pacientovi způsobit nepohodlí (pálivý pocit).</p>
2	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Pevně držte lancetu mezi prsty a sejměte ochranný kryt tahem (z čepele) nebo krouživým pohybem (z jehly).</p> </div> </div>
3	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Pevně uchopte místo vpichu, aby nedošlo k náhlému pohybu, a umístěte nad něj lancetu. Poté jemným stisknutím tlačítka aktivujte lancetu. POZNÁMKA: Při aktivaci bezpečnostní lancety MiniCollect® nestlačujte místo vpichu.</p> </div> </div>
4	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Okamžitě po vpichu vyjměte lancetu jedním pohybem vzhůru a vložte ji do vhodné nádoby pro ostré předměty.</p> </div> </div>
5	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Doporučuje se otřít první kapku krve gázou, protože u první kapky je nejpravděpodobnější, že bude obsahovat nadbytek tkáňové tekutiny. Jemně přerušovaně stlačujte okolní tkáň. Opakovanému silnému tlaku (vytlačování) se musíte vyhnout, protože oba postupy mohou vést k hemolýze nebo kontaminaci vzorků tkáňovou tekutinou.</p> </div> </div>

POZNÁMKA: V případě potřeby použijte tyto pokyny spolu s pokyny k použití zkumavky pro odběry kapilární krve **MiniCollect®**

Informace na štítku

	Výrobce		Katalogové číslo
	Datum použitelnosti		Nepoužívejte opakovaně
	Číslo šarže		Sterilizováno zářením

Literatura:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard—Sixth Edition

Adresa výrobce:
ASAHI Polyslider Company, Limited
860-2 Misaki Maniwa, Okayama,
719-3226 Japonsko
Vyrobeno v Japonsku



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Distributor: Greiner Bio-One GmbH,
Rakousko