

Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino

Návod k použití

Použití

Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino jsou určeny pro použití při každodenních rutinních odběrech kapilární krve, prováděných kvalifikovaným praktikem. Jsou určeny pouze k jednorázovému použití a musí být používány příslušně školeným zdravotnickým personálem podle těchto pokynů.

Popis výrobku

Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino jsou sterilní, jednorázové prostředky aktivované dotekem, určené k provádění vpichů do kůže. Tento prostředek je tvořen jehlou/čepelí z nerezové oceli v plastovém pouzdře a po vpichu dojde k automatickému a trvalému zasunutí.

Bezpečnostní opatření/varování

- Naše pokyny jsou pouhým doporučením. Manipulace s bezpečnostními lancetami **MiniCollect®** Lancelino musí být prováděna v souladu s předpisy a postupy platnými ve vašem zdravotnickém zařízení.
- Při kontaktu s biologickými vzorky může dojít k přenosu HBV, HCV, HIV a dalších infekčních onemocnění. Při kontaktu s biologickými vzorky zajistěte dostatečnou lékařskou pomoc.
- Všechny bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino odkládejte do nádob, které jsou schválené pro likvidaci biologického odpadu.
- Při propichování kůže a manipulaci se zkumavkami pro odběr krve noste rukavice na jedno použití, aby bylo riziko expozice co nejmenší.
- Nepoužívejte bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino po datu jejich expirace.
- Nepoužívejte bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino, pokud byl odstraněn ochranný kryt.
- Lancety s hloubkou vpichu větší než 2 mm se nedoporučuje používat u dětí do jednoho roku věku.
- Bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino se nedoporučují pro použití na patě.

Skladování

Doporučená teplota při skladování: 4–36 °C (40–97 °F). Uchovávejte na suchém místě mimo působení zdrojů přímého či nadměrného tepla.
POZNÁMKA: Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

Zacházení


PŘED PROVEDENÍM VPICHU DO KŮŽE SI PROSTUDUJTE VŠECHNY INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU

Vybavení potřebné k odběru krve.





Dbejte na to, abyste před provedením vpichu měli připraveny tyto materiály:

- Všechny potřebné zkumavky **MiniCollect®**, seřazené podle velikosti, způsobu plnění a přídavné látky, nebo další nezbytné odběrné nádoby.
POZNÁMKA: Koagulační zkumavky 9NC **MiniCollect®** se používají pouze k odběru žilní krve.
- Rukavice a osobní ochranné pomůcky na jedno použití.
- Štítky pro pozitivní identifikaci vzorků pacientů.
- Tampony napuštěné alkoholem pro očištění místa vpichu.
- Náplast nebo gáza.
- Nádoba na ostré předměty pro bezpečnou likvidaci použitého materiálu.

Verzi bezpečnostní lancety **MiniCollect®** Lancelino je třeba zvolit podle tloušťky tkáně pacienta a požadovaného množství odebrané krve.



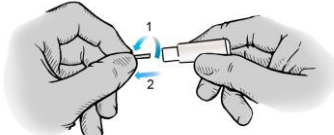

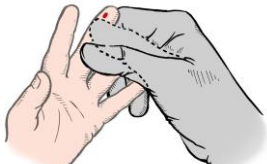


Barva	Průměr/délka jehly nebo čepel	Dosažitelné množství krve
Světle zelená (jehla)	30G / 1,2 mm	
Fialová (jehla)	25G / 1,5 mm	
Modrá (jehla)	21G / 1,8 mm	
Zelená (jehla)	21G / 2,4 mm	
Žlutá (čepel)	0,8 mm / 2 mm	

Na místo odběru lze na 3 až 5 minut přiložit zahřátý vlhký ručník (nebo jiné zahřívací pomůcky) s teplotou nepřevyšující 42 °C (108 °F).

1	<p>Místo vpichu ošetřete vhodnou dezinfekcí. Po očištění nechte místo vpichu do kůže oschnout na vzduchu, aby se mohl uplatnit aseptický účinek alkoholu. Rezidua alkoholu mohou způsobit rychlou hemolýzu, mohou mít nepříznivé účinky na výsledky testu a mohou pacientovi způsobit nepohodlí (pálivý pocit).</p>	
2		<p>Pevně držte lancetu mezi prsty a sejměte ochranný kryt kroutivým pohybem a tahem.</p>
3		<p>Pevně uchopte místo vpichu, aby nedošlo k náhlému pohybu, a umístěte nad něj lancetu. POZNÁMKA: Bezpečnostní lancety MiniCollect® Lancelino se <i>nedoporučují pro použití na patě</i>. Poté lehce přitiskněte lancetu k místu vpichu, aby se aktivovala.</p>
4		<p>Okamžitě po vpichu vyjměte lancetu jedním pohybem vzhůru a vložte ji do vhodné nádoby pro ostré předměty.</p>
5		<p>Doporučuje se otřít první kapku krve gázou, protože je nejpravděpodobnější, že bude obsahovat nadbytek tkáňové tekutiny. Jemně přerušovaně stlačujte okolní tkáň. Opakovanému silnému tlaku (vytlačování) se musíte vyhnout, protože může vést k hemolýze nebo kontaminaci vzorků tkáňovou tekutinou.</p>

POZNÁMKA: V případě potřeby použijte tyto pokyny spolu s pokyny k použití lancet **MiniCollect®** pro odběry kapilární krve.

Informace na štítku

	Výrobce		Sterilizováno zářením
	Datum použitelnosti		Nepoužívejte opakovaně
	Číslo šarže		Viz návod k použití
	Katalogové číslo		

Literatura:

GP42-A6 "Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens"; Approved Standard - Sixth Edition

Adresa výrobce:
HTL-STREFA S.A., 95-035 Ozorków,
7 Adamówek St., Polsko
Vyrobeno v Polsku
Distributor: Greiner Bio-One GmbH,
Rakousko



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Rakousko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791