



Normál csőtartó Használati utasítás



Rendeltetés

A rövid/hosszú típusú normál csőtartó kizárólag **VACUETTE®** többször használatos vérvételi tűkkel és **VACUETTE®** VISIO PLUS tűkkel való használatra szolgál. A termék a **VACUETTE®** vérvételi tűvel együttesen egy rendszerként használatos rutin vénaszűrési eljáráshoz. Ezt az eszközt csak megfelelően képzett egészségügyi szakemberek használhatják, csak ezen utasításoknak megfelelően.

A termék ismertetése

A normál csőtartó egyszer használatos, nem steril, és műanyagból készült. Kompatibilis mindegyik **VACUETTE®** tűvel, **VACUETTE®** luer-adapterrel és **VACUETTE®** vérvételi készlettel.

Használat

VÉNASZÚRÁS VÉGZÉSE ELŐTT OLVASSA VÉGIG EZT A KÖRLEVELET.

A VÉNASZÚRÁS ÉS A VÉRVÉTELI CSÖVEK KEZELÉSE SORÁN VISELJEN GUMIKESZTYŰT A FERTŐZŐ ANYAGOKNAK VALÓ EXPOZÍCIÓ KOCKÁZATÁNAK MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN!

- Távolítsa el a tűvédőt a tűnek arról a szelepet tartalmazó végéről.
MEGJEGYZÉS: A perforált címke nemcsak az azonosítás egyszerűsítésére szolgál, hanem a sterilitásnak és a termék épségének a jelzésére is. Ha a perforáció megsérült, dobja el a tűt, és használjon egy másikat.
- Csavarja a tűt merőleges irányban a normál csőtartóba. Győződjön meg arról, hogy a tű erősen rögzítve van, hogy ne csavarodjon ki használat közben.
MEGJEGYZÉS: A tű nem megfelelő becsavarása a normál csőtartóba a csőtartó és/vagy a tű menetének károsodásához vezethet. Ez a károsodás a tű kilazulását okozhatja vénaszűrés közben.
- Válassza ki a vénaszűrés helyét. Helyezze fel a vénaleszorítót (legfeljebb 1 percre). Készítse elő a vénaszűrés helyét megfelelő fertőtlenítőszerrel. A TISZTÍTÁS UTÁN NE ÉRINTSE MEG A VÉNASZŰRÁSI HELY KÖRNYÉKÉT!
- Helyezze a beteg karját úgy, hogy lefelé irányuljon. Távolítsa el a tű kupakját. Végezze el a vénaszűrést úgy, hogy a beteg karja lefelé irányul, a cső kupakja pedig felfelé.
- Nyomja a csövet a normál csőtartóba és a tűre, hogy a tű szelepe átszűrje a gumidugót. A csövek kupakjának átszűréséhez a normál csőtartóban középre helyezze a csöveket, hogy ne a kupak oldalfalát szűrje át, mert akkor idő előtt megszűnik a csövekben lévő vákuum.
- AMINT A CSŐBEN VÉR JELENIK MEG, SZÜNTESSE MEG A KAR LESZORÍTÁSÁT. AZ ELJÁRÁS SORÁN A CSŐ TARTALMA NEM ÉRINTKEZHET A CSŐ KUPAKJÁVAL VAGY A TŰ VÉGÉVEL, vagyis semmilyen körülmények között nem szabad a csövet az aljával felfelé fordítani az eljárás során. A vákuum teljes szívó hatásának biztosítása érdekében mindig a hüvelykujjával befelé nyomva tartsa a csövet.
MEGJEGYZÉS: Esetenként előfordulhat, hogy vér lép ki a tű hüvelyéből. A kockázatok előfordulásának csökkentése érdekében tartsa be az általános biztonsági óvintézkedéseket.
- Helyezze be a csöveket egymás után a csőtartóba. Gondoskodjon arról, hogy a vérvétel során a cső tartalma ne érintkezzen a cső kupakjával vagy a tű végével.
- Miután az utolsó csőnél megszűnik a vér beáramlása, óvatosan húzza ki a tűt a vénából, és közben nyomjon egy száraz, steril vattát a szűrés helyére, amíg a vérzés el nem áll. Miután megalvadt a vér a szűrés helyén, szükség esetén helyezzen fel egy tapaszt vagy kötést. **NE HELYEZZE VISSZA A TŰRE A KUPAKJÁT!** A kupak visszahelyezése növeli a tűszűrési sérülés kockázatát.
MEGJEGYZÉS: A vénaszűrés után a kupak felső részében maradhat valamennyi vér. A csövek kezelésekor tartsa be a megfelelő óvintézkedéseket a vérről való érintkezés elkerülése érdekében. Minden olyan csőtartó, amely vérről szennyeződik, veszélyesnek minősül, és azonnal el kell dobnia.
- A normál csőtartót a tűvel együtt dobja egy megfelelő hulladéktartóba.

Óvintézkedések és figyelmeztetések

Óvintézkedések

- Használat előtt ellenőrizze a normál csőtartót.
- Ne használja a normál csőtartót, ha megsérült.
- Minden olyan csőtartó, amely vérről szennyeződik, veszélyesnek minősül, és azonnal el kell dobnia.
- Ne helyezze vissza a tűvédőt a **VACUETTE®** tűkre.
- A vénaszűrés után a tűt a normál csőtartóval együtt, egy egységként dobja az éles hulladékok tárolójába az intézményben érvényes irányelveknek és eljárásoknak megfelelően.
- A használat és a hulladékkezelés során a kezeit mindig tartsa a tű mögött.

Figyelmeztetések

- Minden biológiai mintát és „éles” vérvételi kelléket (lándzsák, tűk, luer-adapterek és vérvételi készletek) kezeljen az intézményben érvényes irányelveknek és módszereknek megfelelően.
- A biológiai mintáknak való expozíció (például tűszűrési sérülés) esetén mindig kérjen megfelelő orvosi ellátást, mert ezek terjeszthetnek HIV-et (AIDS), vírusos hepatitiszt és más fertőző betegségeket.
- Minden használt rövid/hosszú típusú normál csőtartót dobjon a tűvel együtt az ehhez jóváhagyott, veszélyes biológiai hulladéknak való tárolóba.
- Vénaszűrés során mindig viseljen gumikesztyűt a fertőző anyagoknak való expozíció kockázatának minimalizálása érdekében!

MEGJEGYZÉS: A normál csőtartó a Greiner Bio-One által gyártott **VACUETTE®** tűkkel való használatra van tervezve. Más gyártók által készített tűk használata a felhasználó felelősségét képezi.







Tárolás

Ne hagyja, hogy közvetlen napfény érje. A javasolt maximálisnál magasabb tárolási hőmérséklet a csőtartó károsodását okozhatja.

Hulladékkezelés

- Ismerni kell és be kell tartani az általános higiéniai irányelveket és a fertőző anyagok megfelelő hulladékkezelésére vonatkozó előírásokat.
- Az eldobható gumikesztyű megakadályozhatja a fertőzésveszélyt.
- A szennyezett rövid/hosszú típusú normál csőtartót a tűvel együtt a vérvétel után azonnal el kell dobni a megfelelő, veszélyes biológiai anyagok tárolására való hulladéktárolóba, amely azután autoklávozható és elégethető.

A címkén található adatok

	Gyártó		Katalógusszám
	Lejárat dátum		Tilos újrahasználni.
	Tételkód		Olvassa el a használati utasítást.



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Ausztria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon: +43 7583 6791