

VACUETTE® Super-T

Stasebånd til engangsbruk

Bruksanvisning

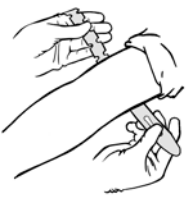


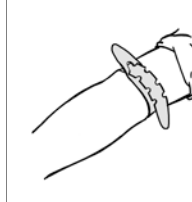
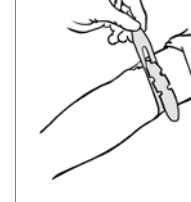
Beregnet bruksområde

VACUETTE® Super-T brukes ved rutinemessig blodprøvetaking for å legge trykk på armen, slik at blodårene blir mer synlige og lettere å kjenne og finne. Produktet skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til instruksjonene.

Produktbeskrivelse

VACUETTE® Super-T er et stasebånd til engangsbruk. Det er laget av silikon og er talkumbelagt. Det inneholder ingen komponenter laget av tørr naturgummi og er uten DEHP.

Håndtering

				
1 Plasser stasebåndet 7.5–10 cm over punksjonsstedet.	2 Legg VACUETTE® Super-T rundt armen, og før den ene enden gjennom åpningen.	3 Hold i begge endene på stasebåndet, og trekk enden med hull gjennom åpningen før du slipper den.	4 Stasebåndet låses deretter på plass.	5 Når blodet renner inn i det første røret, drar du i enden med åpningen, så løsner båndet med det samme.

Hvis et turniké har blitt brukt i mer enn ett minutt, bør det frigjøres og brukes igjen etter 2 minutter. ¹

Advarsler/forholdsregler

- Ikke stram så hardt at det går utover den arterielle blodstrømmen til armen.
- Løsne stasebåndet med en gang blodet begynner å renne inn i det første røret.
- Hvis stasen er for langvarig eller for proksimal, kan dette føre til hemolyse.






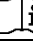

Oppbevaring

Unngå eksponering for direkte sollys.
Oppbevaringstemperatur: 4–25 °C

Kassering

Kastes i henhold til institusjonens retningslinjer.

Etikettinformasjon

	Produsent		Temperaturgrenser
	Utløpsdato		Kun engangsbruk
	Partikode		Se i bruksanvisningen
	Katalognummer		

Litteratur:

¹CLSI GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

Production location:
STARLIM Spritzguss GmbH,
Mühlstrasse 21,
4614 Marchtrenk, Austria
Distributed by Greiner Bio-One GmbH,
Austria



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791