

Uso pretendido

As Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® destinam-se ao uso na rotina diária de coleta de sangue capilar quando delegada por um profissional qualificado. Destinam-se ao uso único e só devem ser utilizadas por profissionais de saúde adequadamente treinados de acordo com as instruções.

Descrição do produto

As Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® são dispositivos estéreis, de uso único e ativados por contato para punção da pele. O dispositivo consiste de uma lanceta de aço inoxidável num invólucro plástico e retrai-se automaticamente e permanentemente após a punção.

Precauções

- As diretrizes fornecidas são apenas recomendações. Por favor consulte as políticas e procedimentos de sua instituição sobre o manuseio das Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect®.
- O VHB, VHC, HIV e outras doenças infecciosas podem ser transmitidas através de contato com amostras biológicas. Na eventualidade de exposição às amostras biológicas, assegure o fornecimento de cuidados médicos apropriados.
- Descarte todas as Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® em recipientes para resíduos de risco biológico aprovados para a seu descarte.
- Utilizar luvas descartáveis durante a punção da pele e quando manusear os tubos de coleta de sangue para minimizar exposição ao perigo.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® após o fim do prazo de validade.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® se a aba de proteção tiver sido removida.
- Lancetas com uma profundidade de perfuração superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de 1 ano de idade.
- Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® não são recomendadas para calcanhares

Armazenamento

Armazenar em local seco, afastado de calor direto ou excessivo. Evitar a exposição à luz solar direta.

Manuseio


Uma toalha quente e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 °C pode ser utilizada para cobrir o local de punção por três a cinco minutos para aumentar o fluxo sanguíneo até sete vezes.

Praticar precauções de segurança gerais, lavar mãos, utilizar luvas e vestuário apropriado para proteção da exposição a patógenos sanguíneos.

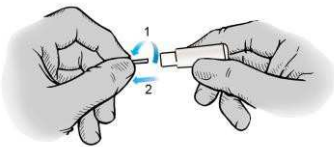
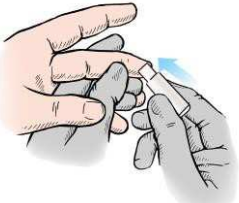

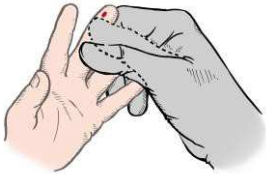
Certificar-se que os seguintes materiais estão prontamente acessíveis antes de realizar uma punção:

- Todos os tubos MiniCollect® necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta necessários.
- Etiquetas para identificação positiva das amostras do paciente.
- Algodão embebido em álcool para limpeza.
- Bandagem adesiva (não recomendado para crianças com menos de 2 anos de idade).
- Recipiente para descarte de material perfuro cortante para descarte seguro das Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect® usadas.

A versão da lanceta deve ser selecionada baseado na espessura do tecido do paciente e volume de sangue necessário.








Cor	Tamanho da agulha ou lâmina/ comprimento	Volume de sangue atingível
Verde claro (agulha)	30 G / 1.2 mm	
Violeta (agulha)	25 G / 1.5 mm	
Azul (agulha)	21 G / 1.8 mm	
Verde (agulha)	21 G / 2.4 mm	
Amarelo (lâmina)	0.8 mm / 2 mm	

Preparar o local da punção com um antisséptico apropriado (por ex. álcool isopropílico 70%). Após limpeza do local da punção, permita a área secar ao ar para que a ação antisséptica do álcool possa fazer efeito. Álcool residual causa hemólise rápida, podendo ter efeito adverso no resultado do teste, e causará desconforto (ardor) ao paciente.

	<p>Segurar a lanceta firmemente entre os dedos e remover a aba de proteção girando e puxando.</p>
	<p>Segurar o local da punção firmemente para prevenir movimento inesperado e posicionar a lanceta sobre ele. Em seguida, pressionar suavemente a lanceta contra o local da punção até à sua ativação.</p>
	<p>Imediatamente após a punção, remover a lanceta em um movimento ascendente e descartar em recipiente apropriado para material perfuro cortante.</p>
	<p>Caso não seja necessária para um teste específico, a primeira gota de sangue deve ser limpa com uma compressa de gaze, visto que é provável que contenha excesso de fluido de tecido. Suavemente aplique pressão intermitente nos tecidos circundantes. Pressão forte e repetitiva (ordenha) deve ser evitada, visto que isto pode causar hemólise ou contaminação da amostra com líquido do tecido.</p>

NOTA: Utilizar estas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do MiniCollect® para Coleta de Sangue Capilar, se necessário.

Informação da etiqueta

	<p>Prazo de validade. Pode ser utilizado até o final do mês indicado</p>		<p>Dispositivo de uso único</p>
	<p>Número de referência</p>		<p>Consultar as Instruções de Uso</p>
	<p>Número do lote</p>		<p>Fabricante</p>
	<p>Método de esterilização (radiação)</p>		

Literatura: CLSI H4-A6 Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard—Sixth Edition

Importador e distribuidor : Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Afonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP.13.473-620 - Americana - SP
FONE - (0xx)(19)-3468-9600 FAX - (0xx)(19)-3468-9601
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 – site: www.gbo.com

Produto Médico de Uso Único

Responsável Técnico: Dra. Maria Gabriela Bazanelli CRF-SP nº 32288

CADASTRO NA ANVISA: 10290310055



Para solicitar formato impresso desta Instrução de Uso,
sem custo adicional, entrar em contato:
(19) 3468-9600 ou info@gbo.com