



Adaptador para coleta de Hemocultura + Adaptador Luer VACUETTE[®]
Instruções de Uso



Indicação de Uso:

O Adaptador para coleta de Hemocultura + Adaptador Luer **VACUETTE[®]** é utilizado para coleta de sangue em frascos de hemocultura e em tubos de coleta de sangue. Este dispositivo deve ser utilizado por profissionais da área da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções.

Descrição do Produto:

O Adaptador para coleta de Hemocultura **VACUETTE[®]** é de uso único, estéril e feito de plástico. O Adaptador Luer integrado é estéril, de uso único, fabricado em aço inoxidável e polipropileno, equipado com uma proteção segura em uma das extremidades.

Manuseio

NOTA: Siga as instruções do fabricante para o uso correto do Adaptador para coleta de Hemocultura e outros acessórios utilizados.

- Conecte o Adaptador para coleta de hemocultura com Luer ao dispositivo de escolha para punção
- Segure o adaptador de hemocultura firmemente e pressione contra o frasco de hemocultura. Os frascos de hemocultura e os tubos de coleta de sangue devem ser mantidos na posição vertical durante a coleta.
- Depois de obtido o correto volume de sangue, retire o adaptador do frasco e continue com a coleta de sangue introduzindo os tubos de coleta de sangue **VACUETTE[®]**.

Precauções / Cuidados

- Não utilizar o dispositivo quando danificado.
- Após a punção venosa, descarte o dispositivo em recipiente apropriado para perfurocortantes, de acordo com as políticas e procedimentos da instituição.
- Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o tempo de uso e descarte.
- Manuseie amostras biológicas e perfurocortantes de acordo com as políticas e procedimentos da sua instituição.
- Procure devida atenção médica em caso de alguma de exposição com amostras biológicas (por exemplo, através de um ferimento com perfurocortantes), pois estes podem transmitir HIV (SIDA), hepatite viral, ou outra doença infecciosa.
- Luvas devem ser calçadas durante a punção para minimizar o risco de exposição.

Armazenamento






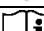


Armazenar o produto a 4–36°C (40–97°F).

NOTA: Evite exposição direta a luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode danificar o produto.


Descarte

- As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de materiais infectantes devem ser seguidas de acordo com o protocolo de cada instituição.
- Luvas descartáveis previnem o risco de contaminação.
- Produtos contaminados com agulhas devem ser descartados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes de descarte para produtos infecciosos os quais possam ser autoclavados e incinerados.

Informações de Rótulo

	Número de Item		Fabricante
	Número de Lote		Limite de Temperatura
	Data de Validade: Utilizar até o final do mês indicado		Consultar as Instruções de Uso
	Não Reutilizar		Esterilização por Óxido de Etileno

Localização da produção:
Nipro (Tailândia) Corporation Limited, 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Tailândia
Fabricado na Tailândia, distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Áustria

Importador e Distribuidor: **Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.**

Afonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP. 13.473-620 - Americana - SP
FONE - (0xx) (19)-3468-9600 FAX - (0xx) (19)-3468-9601
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 - site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

CADASTRO NA ANVISA / MS 10290319008
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com