



Jednorazový PP držiak HOLDEX<sup>®</sup>  
(sterilný)



Návod na použitie  
Nie je k dispozícii v USA!

Týka sa len položiek s nasledujúcim číslom: 450263

**Určené použitie**

Jednorazový PP držiak HOLDEX<sup>®</sup> je určený na použitie pri odberoch krvi v kombinácii s pomôckami na odber krvi so zásuvkovým luerovým portom.

**Opis produktu**

Sterilný jednorazový plastový držiak na jedno použitie s excentrickým zástrčkovým luerovým konektorom v hornej časti držiaka. Na vnútornej strane držiaka je upevnená ihla z nehrdzavejúcej ocele s manžetou, ktorá slúži na prepichnutie viečka pripojenej pomôcky na odber krvi, čím sa uľahčí odber krvi.

**Manipulácia**

1. Obal opatrne otvorte.
2. Jednou rukou uchopíte držiak a zástrčkový luerový spoj nachádzajúci sa v hornej časti držiaka pripojte k zásuvkovému luerovému spoju zvoleného odberového príslušenstva. Dbajte, aby bol bezpečne pripojený.
3. Vykonajte odber krvi v súlade so zásadami danej inštitúcie.
4. Po odbere krvi zlikvidujte podľa nasledujúceho opisu.

**Skladovanie**

Skladujte pri teplote 4 – 25 °C (40 – 77 °F).

**POZNÁMKA:** Zamedzte vystaveniu priamemu slnečnému svetlu. Prekročenie maximálnej odporúčanej teploty skladovania môže viesť k poškodeniu držiaka.








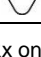
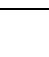
**Bezpečnostné opatrenia/upozornenia**

- V prípade riadneho dodržania návodu bude pomôcka fungovať podľa určenia.
- Ku každému jednotlivému príslušenstvu si vždy pozrite návod na použitie.
- Pri používaní tejto pomôcky na odber krvi vždy používajte rukavice.
- Pred použitím skontrolujte jednotlivý obal, či nie je porušený. Ak je obal poškodený, produkt nepoužívajte.
- Určené na jednorazové použitie u jedného pacienta. Nepoužívajte opakovane, pretože v opačnom prípade hrozí riziko vzniku škodlivých infekcií!
- Pri používaní a likvidácii držte ruky vždy za ihlu.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútornej časti držiaka.
- Ihlu nikdy opätovne nezakrývajte. Odporúča sa použitie bezpečnostných doplnkov.
- Táto pomôcka obsahuje suchý prírodný kaučuk a je zodpovedajúco označená na obale.
- Pri používaní systémov na odber krvi uzavretým spôsobom vždy skontrolujte, či sú skúmavky správne naplnené.
- Produkt smie používať len vhodne zaškolený zdravotnícky personál v súlade s týmto návodom.

**Likvidácia**

Je potrebné zvážiť a dodržať všeobecné hygienické usmernenia a právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie infekčného materiálu. Po použití držiak a všetko jednorazové príslušenstvo zlikvidujte spoločne vo vhodných nádobách na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu.

**Údaje na štítku**

	Výrobca		Teplotný limit
	Dátum použiteľnosti		Nepoužívajte opakovane
	Kód šarže		Pozrite si návod na použitie
	Katalógové číslo		Obsahuje prírodný kaučukový latex
	Sterilizované ožiarением	Rx only	Pomôcka na lekársky predpis



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Straße 32  
4550 Kremsmünster  
Rakúsko

[www.gbo.com/preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)  
[office@at.gbo.com](mailto:office@at.gbo.com)  
Tel. +43 7583 6791