



Jednorazový PP držiak HOLDEX® (sterilný)



Návod na použitie

Týka sa len položiek s nasledujúcim číslom: 450241

Určené použitie

Jednorazový PP držiak HOLDEX® je určený na použitie pri odberoch žilovej krvi v kombinácii s pomôckami na odber krvi so zásuvkovým luerovým portom.

Opis produktu

Sterilný jednorazový plastový držiak na jedno použitie s excentrickým zástrčkovým luerovým konektorom v hornej časti držiaka. Na vnútornej strane držiaka je upevnená ihla z nehrdzavejúcej ocele s manžetou, ktorá slúži na prepichnutie viečka pripojenej pomôcky na odber krvi, čím sa uľahčí odber krvi.

Manipulácia

1. Obal opatrne otvorte.
2. Jednou rukou uchopte držiak a zástrčkový luerový spoj nachádzajúci sa v hornej časti držiaka pripojte k zásuvkovému luerovému spoju zvoleného odberového príslušenstva. Dbajte, aby bol bezpečne pripojený.
3. Vykonaajte odber krvi v súlade so zásadami danej inštitúcie.
4. Po odbere krvi zlikvidujte podľa nasledujúceho opisu.

Skladovanie

Skladujte pri teplote 4 – 25 °C (40 – 77 °F).

POZNÁMKA: Zamedzte vystaveniu priamemu slnečnému svetlu. Prekročenie maximálnej odporúčanej teploty skladovania môže viesť k poškodeniu držiaka.







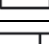
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
Bezpečnostné opatrenia/upozornenia

- V prípade riadneho dodržania návodu bude pomôcka fungovať podľa určenia.
- Ku každému jednotlivému príslušenstvu si vždy pozrite návod na použitie.
- Pri používaní tejto pomôcky na odber krvi vždy používajte rukavice.
- Pred použitím skontrolujte jednotlivý obal, či nie je porušený. Ak je obal poškodený, produkt nepoužívajte.
- Určené na jednorazové použitie u jedného pacienta. Nepoužívajte opakovane, pretože v opačnom prípade hrozí riziko vzniku škodlivých infekcií!
- Pri používaní a likvidácii držte ruky vždy za ihlou.
- Nikdy sa nedotýkajte vnútornej časti držiaka.
- Ihlu nikdy opätovne nezakrývajte. Odporúča sa použitie bezpečnostných doplnkov.
- Pri používaní systémov na odber krvi uzavretým spôsobom vždy skontrolujte, či sú skúmavky správne naplnené.
- Produkt smie používať len vhodne zaškolený zdravotnícky personál v súlade s týmto návodom.

Likvidácia

Je potrebné zvážiť a dodržať všeobecné hygienické usmernenia a právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie infekčného materiálu. Po použití držiak a všetko jednorazové príslušenstvo zlikvidujte spoločne vo vhodných nádobách na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu.

Údaje na štítku

	Výrobca		Teplotný limit
	Dátum použiteľnosti		Nepoužívajte opakovane
	Kód šarže		Pozrite si návod na použitie
	Katalógové číslo	Rx only	Pomôcka na lekársky predpis
	Sterilizované ožiarením		



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Rakúsko

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tel. +43 7583 6791