

Určené použitie

Držiak na krvné kultúry a luerový adaptér **VACUETTE®** sa používa so zásuvkovým luerovým systémom na odber žilovej krvi do fliaš na krvné kultúry alebo do skúmaviek na odber krvi uzavretým spôsobom. Pomôcku smie používať len vhodne zaškolený zdravotnícky personál v súlade s týmto návodom.

Opis produktu

Držiak na krvné kultúry **VACUETTE®** je jednorazový, sterilný a vyrobený z plastu. Integrovaný luerový adaptér je sterilná, jednorazová pomôcka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a polypropylénu, ktorá je na jednom konci vybavená bezpečnostným ventilom.

Odber vzoriek a manipulácia s nimi

POZNÁMKA: Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa správnej manipulácie s fľašami na krvné kultúry a iným používaným príslušenstvom.

- Pomôcku pripojte k luerovému zásuvkovému systému.
- Držiak na krvné kultúry pevne uchopte a zatlačte na fľašu. *Fľaše na krvné kultúry a odberné skúmavky sa musia počas odberu udržiavať vo zvislej polohe.*
- Po získaní správneho množstva krvi odsuňte držiak od fliaš a (v prípade potreby) pokračujte v odbere do skúmaviek **VACUETTE®** na odber krvi.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa výrobku VACUETTE®

- Poškodenú pomôcku nepoužívajte.
- Pomôcku po vpichu do žily zlikvidujte ako jeden celok vo vhodnej nádobe na ostré predmety v súlade s postupmi používanými vo vašom zariadení.
- Počas používania a likvidácie držte ruky vždy za ihlami.
- So všetkými biologickými vzorkami a ostrými predmetmi na odber krvi manipulujte v súlade so zásadami a postupmi uplatňovanými vo vašom zariadení.
- V prípade akéhokoľvek vystavenia sa biologickým vzorkám (napríklad pri pichnutí sa) vyhľadajte vhodnú lekársku pomoc, pretože môže dôjsť k prenosu HIV, vírusovej hepatitídy alebo inej infekčnej choroby.
- Pri vpichu do žily sa musia vždy použiť rukavice, aby sa minimalizovalo riziko expozície.

Skladovanie



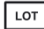





Výrobok skladujte pri teplote 4 – 36 °C.

POZNÁMKA: Zamedzte vystaveniu priamemu slnečnému svetlu. Prekročenie maximálnej odporúčanej teploty skladovania môže viesť k poškodeniu pomôcky.

Likvidácia


- Je potrebné zvážiť a dodržať všeobecné hygienické usmernenia a právne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie infekčného materiálu.
- Jednorazové rukavice môžu zabrániť nebezpečenstvu infekcie.
- Kontaminované výrobky s ihlami sa musia zlikvidovať bezodkladne po odbere krvi, a to vo vhodných nádobách na likvidáciu biologicky nebezpečného odpadu, ktoré možno sterilizovať v autokláve a spáliť.

Údaje na štítku

 REF	Katalógové číslo		Výrobca
 LOT	Kód šarže		Teplotný limit
	Dátum použiteľnosti, (Spotrebujte do konca uvedeného mesiaca)		Pozrite si návod na použitie
	Nepoužívajte opakovane		Sterilizované etylénoxidom

Upozornenie: Podľa federálnych zákonov USA je predaj tohto zariadenia možný len lekárom alebo na predpis lekára.

Adresa výrobcu:
Nipro (Thajsko) Corporation Limited, 10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena, Phra
Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thajsko
Vyrobené v Thajsku, distribuuje Greiner Bio-One GmbH, Rakúsko

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Rakúsko