

## Juego SAFETY de extracción de sangre o juego de extracción de sangre



+  
soporte para hemocultivos  
Instrucciones de uso

### Utilización

El juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre + soporte para hemocultivos se utiliza en la rutina cotidiana de extracción de sangre. La cánula de mariposa del juego SAFETY para la extracción de sangre está construida con una cápsula de seguridad que debe activarse para cubrir la aguja inmediatamente después de la extracción de sangre y evitar que se produzcan heridas con la aguja. El soporte para hemocultivos se utiliza para extraer sangre en frascos para hemocultivo y tubitos.

### Descripción del producto

El juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre + soporte para hemocultivos son productos estériles de un solo uso. Constan de una cánula de mariposa unida con un tubo flexible en cuya punta se encuentra un soporte para hemocultivos. La forma del soporte permite extraer sangre tanto en frascos para hemocultivo como en tubitos de muestras de sangre VACUETTE®. Estos productos no son fabricados con látex de goma natural.

### Utilización

- Limpie el punto de punción y lávese las manos de acuerdo con las respectivas normas vigentes de higiene y seguridad de su institución.
- Desinfecte el punto de punción de los frascos para hemocultivo con un algodón empapado en alcohol y espere hasta que se evapore el alcohol al aire.
- Realice la venipuntura con el brazo del paciente orientado hacia abajo. *Los frascos para hemocultivo y los tubitos de muestras de sangre deberían permanecer en posición vertical durante la extracción.*  
*INDICACIÓN: Por favor, observe las indicaciones del fabricante para utilizar correctamente los frascos para hemocultivo.*
- Sujete el soporte sobre el frasco para hemocultivos y presiónelo hacia abajo. Si utiliza usted frascos anaeróbicos y aeróbicos, llene primero el frasco aeróbico y luego el anaeróbico.
- Una vez obtenida la cantidad correcta de sangre, quite usted el soporte del frasco y (si es necesario) continúe la extracción de sangre con los tubitos de muestras de sangre VACUETTE®.
- Una vez finalizada la extracción de sangre sujete el algodón con una mano sobre el punto de punción.
- Si utiliza usted el juego SAFETY de extracción de sangre desbloquee el pasador de la cánula de mariposa apretando a ambos lados del mecanismo de seguridad. Tire del mecanismo de seguridad hacia atrás hasta que se oiga claramente un clic. Oír el clic es un signo de que el mecanismo de seguridad se ha activado correctamente.
- Elimine el dispositivo junto con el soporte en el recipiente previsto para la eliminación de residuos de acuerdo con las respectivas normas vigentes de higiene y seguridad de su institución.
- Si utiliza un juego de extracción de sangre, elimínelo junto con el soporte en el recipiente previsto para la eliminación de residuos de acuerdo con las respectivas normas vigentes de higiene y seguridad de su institución.  
*INDICACIÓN: Tenga siempre las manos detrás de la aguja durante su uso y eliminación.*
- La presión sobre el punto de punción debe ejercerse según las directivas locales de seguridad.  
*INDICACIÓN: No ejerza demasiada presión sobre el punto de punción.*

### Advertencias / Indicaciones de seguridad de VACUETTE®

- Compruebe el juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre + soporte para hemocultivos antes de su uso para ver si está deteriorado. No utilice el juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre + soporte para hemocultivos si está deteriorado.
- Elimine los juegos SAFETY de extracción de sangre y los juegos de extracción de sangre + soporte para hemocultivos contaminados con sangre y, con ello, potencialmente infecciosos echándolos en los recipientes previstos para la eliminación de residuos.
- No vuelva a cubrir la aguja del juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre.
- Una vez activado el mecanismo de seguridad del juego SAFETY de extracción de sangre, no aplicar fuerza bruta para reactivarlo ni para desbloquearlo.
- Tras la venipuntura, elimine la aguja usada con el juego SAFETY de extracción de sangre y/o el juego de extracción de sangre + soporte para hemocultivos como si se tratara de una sola unidad en recipientes para objetos punzantes de acuerdo con las respectivas normas vigentes de higiene y seguridad de su institución.
- Tenga siempre las manos detrás de la aguja durante su uso y eliminación.
- La manipulación de pruebas biológicas y accesorios para la extracción de sangre (por ejemplo: lancetas, agujas, adaptadores Luer y juegos para extracción de sangre) tiene que hacerse observando y respetando las correspondientes directivas higiénicas y de seguridad vigentes.
- Obtenga el tratamiento médico adecuado en caso de contacto con pruebas biológicas (por ejemplo, debido a una herida por punción) ya que pueden transmitir VIH (SIDA), hepatitis vírica y otras enfermedades infecciosas.
- Toda aguja utilizada se considera como contaminada y debería echarse inmediatamente después de la extracción en un recipiente adecuado para la eliminación de residuos de pruebas biológicas. La reutilización del producto puede causar infecciones nocivas para la salud, heridas o incluso la muerte.
- La eliminación los juegos SAFETY de extracción de sangre y los juegos de extracción de sangre con el soporte tiene que hacerse en los recipientes de eliminación de residuos previstos para ello.
- ¡Utilice guantes durante la extracción de sangre y al trabajar con los tubitos de muestras de sangre para reducir el riesgo de entrar en contacto con la sangre!
- Hay que extremar las precauciones al hacer la extracción especialmente si los pacientes, por ejemplo, están inmovilizados, padecen hemofilia o epilepsia.
- Debido al riesgo de contaminación de la superficie por el goteo de sangre de la punta de la aguja usada, se recomienda eliminar el agua con la punta hacia arriba.
- No tape el mecanismo de seguridad con cinta adhesiva.
- No intente manipular el mecanismo de seguridad tras la activación.

### Almacenamiento

Temperatura recomendada para el almacenamiento: 4–36°C (40–97° F).

*INDICACIÓN: Evite la exposición directa a la luz solar. Superar la temperatura máxima de almacenamiento recomendada puede alterar la calidad del soporte.*

### Eliminación de residuos

- Hay que observar y respetar las directivas generales sobre higiene y las normas legales para la eliminación adecuada de residuos de material infeccioso.
- Deben utilizarse guantes desechables para evitar el riesgo de infección.
- Los productos contaminados con agujas se deben eliminar tras la extracción de sangre en recipientes apropiados para residuos de material potencialmente infeccioso que a continuación se tratan en autoclave o se incineran.

### Información de la etiqueta



Número de catálogo



Número de lote



Fecha de caducidad (se puede utilizar hasta el final del mes indicado)



Esterilización por gas de óxido etilénico



No reutilizar



Consulte las instrucciones de uso



Fabricante

### Referencias

CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute)

H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition

M47-A Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guideline

Precaución: la ley federal estadounidense permite la venta de este dispositivo por parte de un médico o bajo prescripción facultativa.

Production Location: Nipro (Thailand) Corporation Limited,  
10/2 Moo 8 Bangnongko, Sena, Phra Nakhon Si  
Ayutthaya 13110, Thailand

Made in Thailand, distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH  
Bed Haller Straße 32  
4550 Kremsmünster  
Austria

www.gbo.com/preanalytics  
faq.pa@gbo.com  
(+43) 07583/6791