

Användningsinstruktioner
Ej tillgängliga i USA!

Gäller endast följande artikelnummer: 450263

Användning

HOLDEX[®]-engångshållaren PP är avsedd för procedurer för bloduppsamling i kombination med bloduppsamlingsenheter med en honluerport.

Produktbeskrivning

En steril engångshållare av plast med en decentrerad hanluerkoppling högst upp på hållaren. En nål av rostfritt stål med en hylsa ansluten till insidan av hållaren för att underlätta bloddragning genom att punktera korken på en ansluten enhet för bloduppsamling.

Handhavande

1. Öppna förpackningen försiktigt.
2. Ta tag i hållaren med ena handen och anslut hanluerkopplingen högst upp på hållaren till honluerporten på det valda uppsamlingstillbehöret. Kontrollera att anslutningen är säker.
3. Utför bloduppsamlingen enligt rutinerna på din enhet.
4. Efter bloduppsamling ska produkten kasseras enligt nedanstående beskrivning.

Förvaring

Förvara hållaren vid 4–25 °C (40–77 °F).

OBS! Undvik exponering för direkt solljus. Om högsta rekommenderade förvaringstemperatur överskrids kan hållarens kvalitet försämrans.










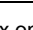
Försiktighetsåtgärder/Varningar

- Enheten fungerar som den ska när anvisningarna följs.
- Läs alltid bruksanvisningen till varje enskilt tillbehör.
- Använd alltid handskar vid bloddragning när du använder den här enheten.
- Kontrollera att den enskilda förpackningen är obruten före användning. Om förpackningen är bruten ska produkten inte användas.
- Endast för engångsanvändning på en patient. Återanvänd inte på grund av risken för skadliga infektioner!
- Håll alltid händerna bakom en nål under användning och kassering.
- Vidrör aldrig hållarens insida.
- Sätt aldrig tillbaka en skyddshylsa på en nål. Användning av säkerhetstillbehör rekommenderas.
- Den här enheten innehåller torrt naturgummi och har en motsvarande märkning på förpackningen.
- Kontrollera alltid att rören fylls på rätt sätt när du använder ett bloduppsamlingssystem med vakuum.
- Produkten kan användas endast av lämpligen utbildad vårdpersonal i enlighet med dessa anvisningar.

Avfallshantering

Följ de allmänna hygienriktlinjerna och rättsliga bestämmelserna för korrekt kassering av smittförande material. Efter användning ska hållaren och alla engångstillbehör kasseras tillsammans i lämpliga behållare för biologiskt riskavfall.

Märkning på produktetiketter

	Tillverkare		Temperaturgräns
	Utgångsdatum		Återanvänd inte
	Batchnummer		Konsultera användningsinstruktionerna
	Artikelnummer		Innehåller eller närvaro av naturgummilatex
	Steriliserad med hjälp av bestrålning		Receptbelagd produkt



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
4550 Kremsmünster
Österrike

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791