

Your **Power** for Health



greiner bio-one



VACUETTE®

Unité de
prélèvement à
ailettes Sécurité

Nos innovations
pour votre sécurité


Unité de prélèvement à ailettes Sécurité

Pour les prélèvements difficiles

L'unité de prélèvement à ailettes Sécurité (UPS) a été spécialement développée pour les patients présentant un capital veineux fragilisé. En raison du confort qu'elle procure lors de l'acte de prélèvement, elle est également adaptée à toutes les situations quotidiennes.

Dès lors que l'aiguille est introduite dans la veine du patient, le mécanisme de protection s'active entraînant un niveau élevé de sécurité. L'activation par rétraction de l'aiguille dans le système est indiquée par un signal sonore.

Ces systèmes vous protègent ainsi que vos collaborateurs des risques d'accident d'exposition au sang.

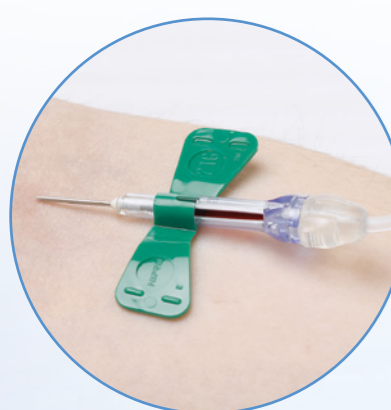

Fenêtre transparente

Le contrôle automatique du débit sanguin dans la fenêtre transparente indique si la veine a été correctement perforée.



Mécanisme de sécurité

Déclenchement facile et rapide du mécanisme de sécurité par une légère pression des 2 ergots. Activation définitive de la sécurité lors du déclenchement du « clic » sonore.

Combiné

L'UPS peut être utilisée à la fois pour le prélèvement et la perfusion sanguine (pendant une durée de 5 heures).



Plus de flexibilité

Une tubulure souple à large diamètre offre souplesse et débit important.

Gamme complète des unités de prélèvement à ailettes Sécurité

Pour plus de sécurité, les unités de prélèvement à ailettes Sécurité sont disponibles pré-montées :

Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer

- Unités pré-monté avec adaptateur luer dans un sachet unitaire stérile.
- Manipulation optimisée.



Art. n° 450081-84
Art. n° 450095-96
Art. n° 450099

Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement

- Solution pré-montée avec corps de pompe dans un sachet unitaire stérile.
- Gain de temps : solution pré-montée.
- Solution pratique et complète pour un gain de sécurité.



Art. n° 450080
Art. n° 450085-88
Art. n° 450160-61


Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture

- Solution pré-monté avec corps de pompe universel pour flacon d'hémoculture dans un sachet unitaire stérile.
- Spécialement étudié pour les prélèvements mixtes (Fla cons d'hémoculture + tubes VACUETTE®) en un seul geste.
- Nombre de prélèvement réduit, geste productif et sûr ainsi que gain de temps pour le prélèvement.



Art. n° 450182-85


Procédure d'utilisation*

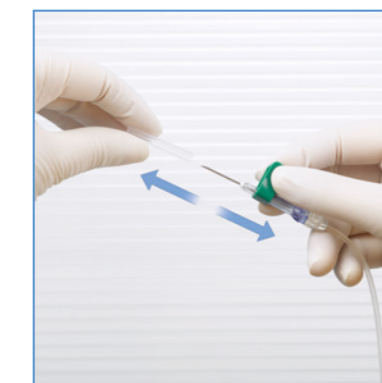


1 Retirez le capuchon de protection




2 Réalisez la ponction veineuse

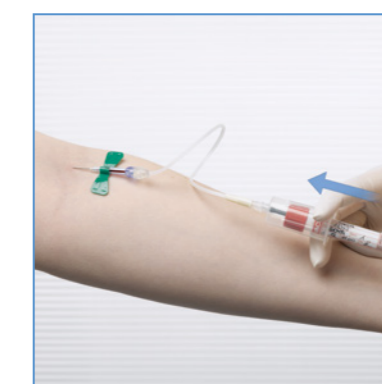

3 Introduisez le tube

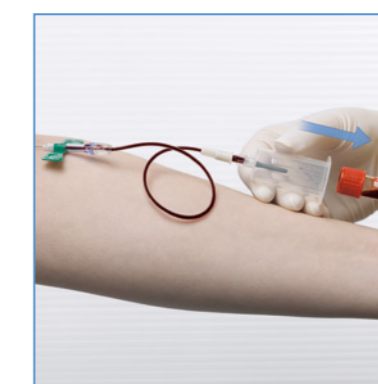


4 Retirez le dernier tube

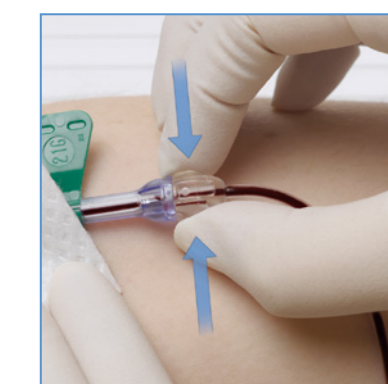

5 Activez le mécanisme de sécurité (en appuyant sur les deux renforcements bleus tout en tirant vers l'arrière afin de faire coulisser l'aiguille jusqu'à l'arrêt)



6 Un clic audible signale que le mécanisme est sécurisé

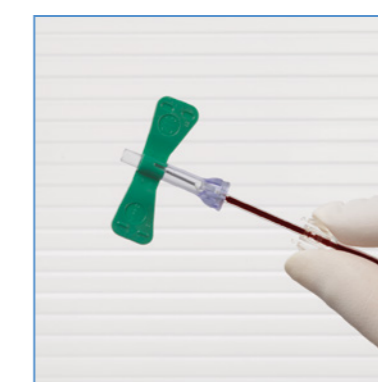

7 Unité de prélèvement sanguin SÉCURITÉ activée



8 Éliminez le dispositif

* Pour des instructions complètes sur l'utilisation, veuillez consulter le Mode d'emploi de chaque produit.

Unité de prélèvement à ailettes Sécurité

Art. N°	Description	Taille	Conditionnement		
			Intérieur	Extérieur	
Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité (stérile)					
450090	Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité	Longueur de la tubulure : 19cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450091	Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité	Longueur de la tubulure : 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450191	Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité	Longueur de la tubulure : 30cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450092	Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité	Longueur de la tubulure : 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450192	Unité de Prélèvement / Perfusion à ailettes Sécurité	Longueur de la tubulure : 30cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer (stérile)					
450083	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 10cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450081	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 19cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450095	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 30cm	21G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450084	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 10cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450082	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 19cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450096	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 30cm	23G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
450099	Unité de prélèvement à ailettes Sécurité + adaptateur Luer	Longueur de la tubulure : 30cm	25G x 3/4"	50 pcs.	1.000 pcs.
Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement (stérile)					
450087	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 10cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450085	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450160	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 30cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450088	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 10cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450086	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450161	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 30cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450080	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement	Longueur de la tubulure : 30cm	25G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture (stérile)					
450182	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture	Longueur de la tubulure : 19cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450183	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture	Longueur de la tubulure : 19cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450184	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture	Longueur de la tubulure : 30cm	21G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.
450185	Unité de Prélèvement à ailettes Sécurité + corps de prélèvement pour hémoculture	Longueur de la tubulure : 30cm	23G x 3/4"	24 pcs.	240 pcs.

Ces produits ne sont pas faits de latex de caoutchouc naturel ou de DEHP.



Pour plus d'informations,
nous vous invitons à visiter notre site
www.gbo.com/preanalytics ou à nous contacter.

Autriche (siège)

Greiner Bio-One GmbH
Tél. +43 7583 6791-0
E-Mail office@at.gbo.com

Etats-Unis

Greiner Bio-One North America Inc.
Tél. +1 704 261-7800
E-Mail info@us.gbo.com

Allemagne

Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tél. +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Tél. +33 1 69 86 25 25
E-Mail accueil@gbo.com

Italie

Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Tél. +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Royaume-Uni

Greiner Bio-One Ltd.
Tél. +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

Brésil

Greiner Bio-One Brasil
Tél. +55 19 3468-9600
E-Mail office@br.gbo.com

Hongrie

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tél. +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

Japon

Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tél. +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Suisse

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tél. +41 71 228 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Chine

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tél. +86 10 83 55 19 91
E-Mail office@cn.gbo.com

Inde

Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tél. +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Pays-Bas

Greiner Bio-One B.V.
Tél. +31 172 4209 00
E-Mail info@nl.gbo.com

Thaïlande

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tél. +66 38 46 56 33
E-Mail office@th.gbo.com

Espagne

Greiner Bio One España, S.A.U.
Tél. +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

Indonésie

Greiner Bio One Indonesia KPPA
Tél. +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Portugal

VACUETTE Portugal S.A.
Tél. +351 252 647 721
E-Mail info@vacuette.pt

Turquie

Greiner Bio-One Turkey
Tél. +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

